

ИНСТРУКЦИЯ по применению медицинского изделия

Наименование:

Бактерицидный лейкопластырь Верофарм

Описание:

Бактерицидный лейкопластырь Верофарм представляет собой ленту Лейкопластыря Верофарм или Лейкопластыря «Унипласт фиксирующий» с подушечкой зеленого цвета из нетканого материала, пропитанного раствором антисептиков, покрытую с липкой стороны защитным покрытием.

Состав:

Лейкопластырь Верофарм или Лейкопластырь «Унипласт фиксирующий», нетканый материал, фурацилин, синтомицин, бриллиантовый зеленый, спирт этиловый, пленка целлюлозная нелакированная или пленка полиэтилентерефталатная, или материал антиадгезионный или бумага силиконизированная.

Описание принципа действия:

Бриллиантовый зеленый, синтомицин и фурацилин, содержащиеся в подушечке лейкопластыря оказывают антисептическое действие при наклеивании пластыря на небольшие порезы, ссадины, царапины и другие мелкие повреждения кожи.

Область применения:

Десмургия.

Условия применения:

В стационарных и амбулаторных лечебно-профилактических медицинских учреждениях и в домашних условиях.

Показания к применению:

Бактерицидный лейкопластырь Верофарм предназначен для использования в качестве наружного антисептического перевязочного средства при небольших порезах, ссадинах, царапинах и других мелких повреждениях кожи.

Противопоказания для применения:

Повышенная чувствительность к веществам, входящим в состав изделия.

Возможные побочные действия при применении:

Возможны аллергические реакции на вещества, входящие в состав изделия. При их возникновении использование пластыря необходимо прекратить.

Меры предосторожности при применении:

Только для наружного применения.

Не использовать по истечении срока годности.

Не использовать повторно.

Хранить в недоступном для детей месте.

Способ применения:

Открыть бумажный пакет, вынуть пластырь и снять с его поверхности защитное покрытие, не прикасаясь пальцами к подушечке, приложить ее на рану, а липкую часть пластыря приклеить к сухой чистой коже. Менять каждые 3-4 часа для достижения оптимального заживляющего эффекта.

Взаимодействия с другими медицинскими изделиями:

Не использовать одновременно с другими наружными средствами на одних и тех же участках.

Указание возможности и особенностей применения для людей с имплантируемыми в организм человека медицинскими изделиями, беременных женщин, женщин в период грудного вскармливания, детей, взрослых имеющих хронические заболевания:

Исследование применения Бактерицидного лейкопластыря Верофарм для людей с имплантируемыми в организм человека медицинскими изделиями, беременных женщин, женщин в период грудного вскармливания, детей, взрослых имеющих хронические заболевания не проводилось. Решение об использовании следует принимать, оценивая соотношение возможного риска для пациента.

Сведения о возможном влиянии использования на способность управлять транспортными средствами, механизмами:

Исследования о возможном влиянии Бактерицидного лейкопластыря Верофарм на способность управлять транспортными средствами, механизмами не проводились. Решение об использовании следует принимать, оценивая соотношение возможного риска для пациента.

Форма выпуска:

Бактерицидный лейкопластырь Верофарм упаковывают в контурную безъячейковую упаковку или пакет из бумаги, или пакет с клапаном, или пачку складную из картона по 1 штуке или в виде ленты от 2 до 10 штук контурных безъячейковых упаковок.

Наборы от 2 до 100 штук изделий одного типоразмера и формы или различных типоразмеров и форм в пакете с клапаном или пачке из картона.

Условия хранения:

Хранить в сухом, защищенном от света месте.

Срок годности:

3 года со дня изготовления.

Требования безопасности и охраны окружающей среды:

В условиях эксплуатации Бактерицидный лейкопластырь Верофарм нетоксичен, не обладает местно-раздражающим и сенсибилизирующим действием, не пирогенен; по токсикологическим показателям отвечает требованиям безопасности, предъявляемым к медицинским изделиям, контактирующим с кожными покровами и раневой поверхностью кожи человека.

Лейкопластырь относится к горючим веществам, не взрывоопасен.

Охрана окружающей среды по ГОСТ 17.2.3.01.

При производстве лейкопластыря образующиеся отходы складываются в контейнеры и утилизируются в установленном порядке.

Технические характеристики:

Бактерицидный лейкопластырь Верофарм производится в следующих исполнениях:

- полоска липкая прямоугольной формы с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой следующих типоразмеров в см: 0,95x3,8; 6,0x2,0; 4,0x10,0; 6,0x10,0; 8,0x10,0; 6,0x100,0; 6,0x500,0;
- полоска липкая прямоугольной формы с закругленными углами с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой следующих типоразмеров в см: 1,9x7,2; 2,3x7,2; 2,5x7,2; 3,8x7,2;
- полоска липкая квадратной формы с закругленными углами или без них с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой размером в см: 3,8x3,8;
- полоска липкая круглой формы с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой диаметром 2,3 см;
- полоска липкая фигурная с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой следующих типоразмеров в см: 3,8x7,0; 3,8x7,5; 5,0x4,4; 5,0x8,0; 5,0x10,0.

На поверхности Бактерицидного лейкопластыря Верофарм не должно быть загрязненных участков, посторонних включений.

Количественное содержание бриллиантового зеленого в подушечке не менее 0,1 мг/г; фурацилина не менее 0,6 мг/г; синтомицина не менее 2,4 мг/г.

Поглощающая способность подушечки не менее 6,00 г/г.

Подушечка лейкопластыря обладает микробиологической чистотой.

Порядок осуществления утилизации и уничтожения:

Использованный Бактерицидный лейкопластырь Верофарм относится к отходам класса А или Б и утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами".

Неиспользованный Бактерицидный лейкопластырь Верофарм специальных мер предосторожности при уничтожении не имеет.

Производитель:

АО «ВЕРОФАРМ»

Юридический адрес: Российская Федерация, 107023, г. Москва, Барабанный пер., д.3,
Тел.(495)792-53-30.

Адрес производства и принятия претензий: Российская Федерация, 394006, г. Воронеж,
ул. Кольцовская, д.80,
Тел./факс (473) 277-94-90

Директор по качеству
И.О. ДАВЫДОВИЧ

Директор по ИТ
И.О. ДАВЫДОВИЧ