

## **Руководство по применению изделия медицинского назначения Салипод лейкопластырь мозольный**

### **Описание:**

полоска ткани со слоем мозольной массы, приклеенная к липкой основе – лейкопластырю, прямоугольной, фигурной или круглой формы или полоска ткани со слоем мозольной массы прямоугольной, фигурной или круглой формы в комплекте с лейкопластырем или без него с защитным покрытием.

### **Состав:**

Каучук натуральный, сера осажденная или сера техническая, кислота салициловая, ланолин безводный, масло вазелиновое медицинское, канифоль сосновая, смола сосновая, присадка антиокислительная, ткань хлопчатобумажная или ткань вискозная, Лейкопластырь Унипласт фиксирующий или Лейкопластырь Верофарм, материал антиадгезионный или бумага силиконизированная, или пленка полиэтилентерефталатная или пленка целлюлозная нелакированная.

### **Область применения:**

Салипод лейкопластырь мозольный предназначен для использования в качестве кератолитического средства.

### **Способ применения:**

Перед наложением мозольного лейкопластыря следует сделать теплую ванну ноги и вытереть ногу досуха.

Мозольный лейкопластырь на фиксирующем лейкопластыре:

С полоски лейкопластыря снять защитное покрытие. Мозольный лейкопластырь (темный цвет полоски) наложить на мозоль, а липкую часть (белый цвет полоски) приклеить к коже, слегка прижав пальцами. Через два дня лейкопластырь снять. Если мозоль не размягчилась, наложение мозольного лейкопластыря повторить в том же порядке 3-4 раза.

Мозольный лейкопластырь в комплекте с фиксирующим лейкопластырем:

Отрезать пластырь (темного цвета) нужного размера, отделить его от защитного покрытия, наложить на мозоль и закрыть полоской фиксирующего лейкопластыря (белого цвета), шириной несколько большей, чем наложенный пластырь. Через два дня лейкопластырь снять. Если мозоль не размягчилась, наложение мозольного лейкопластыря повторить в том же порядке 3-4 раза.

Мозольный лейкопластырь:

Отрезать кусочек пластыря нужного размера, отделить его от защитного покрытия, наложить на мозоль. В случае необходимости пластырь можно закрепить обычным лейкопластырем или бинтом. Через два дня пластырь снять. Если мозоль не размягчилась, наложение мозольного лейкопластыря повторить в том же порядке 3-4 раза.

### **Противопоказания:**

Повышенная чувствительность к компонентам пластыря. Нарушение целостности кожных покровов в местах предполагаемого наложения пластыря.

### **Побочное действие:**

При контакте со здоровой кожей возможно ее раздражение.

### **Условия хранения:**

Хранить в сухом, защищенном от света месте

**Срок годности:** 2 года.